

# pts connect™ dock



## Benutzerhandbuch

### Verwendungszweck

Das PTS Connect™ Docksystem ist für eine Verwendung durch professionelle Benutzer vorgesehen. Das PTS Connect Docksystem ermöglicht, dass das A1CNow® System und PTS Detect™ Analysegeräte die aktuellsten Testergebnisse an einen angeschlossenen Computer übertragen.

### Hardware-Anforderungen

Enthalten:

- PTS Connect Dock
- USB-RS232-Adapter, seriell (Adapter)
- USB-USB-Kabel

Erforderlich, jedoch nicht enthalten:






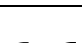

- Computer mit verfügbarem USB-Anschluss

### Betrieb

Folgende Schritte durchführen, um die aktuellsten Testergebnisse vom Analysegerät auf einen

Computer zu übertragen, der mit einem verfügbaren USB-Anschluss ausgestattet ist:

1. Den 9-poligen Steckverbinder des mitgelieferten Adapters an den PTS anschließen  
Die 9-polige Buchse des Docks anschließen.
2. Den USB-Anschluss des mitgelieferten Kabels an den Dock anschließen und das andere  
Ende in einen freien Anschluss am Computer einstecken.
3. Eine Anwendung ausführen, die Ergebnisse vom PTS Connect Dock aufzeichnet.
4. Einen Test an einem A1CNow-Analysegerät oder PTS Detect-Analysegerät durchführen.
5. Sobald der Testvorgang abgeschlossen ist und das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird,  
die Testkarte aus dem Analysegerät entfernen.
6. Das Analysegerät auf der Basisstation des PTS Connect Dock platzieren und nach unten  
drücken, wenn es zum Herunterladen der Daten bereit ist.
7. Das Analysegerät zeigt das Wort „DOCK“ an, und das Ergebnis wird auf die  
Anwendung übertragen.
8. Das Analysegerät vom PTS Connect Dock trennen.
9. Der PTS Connect Dock ist bereit für die Übertragung des nächsten  
Testergebnisses.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	
	KATALOGNUMMER
	GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN
	BEVOLLMÄCHTIGTER IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
	CHARGENNUMMER
	HERSTELLER
	DIESES PRODUKT ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 98/79 EG FÜR MEDIZINGERÄTE ZUR IN-VITRO-DIAGNOSTIK
	GETRENNTE ERFASSUNG: DIE ENTSORGUNG VON BATTERIEN MUSS GEMÄSS DEN GELTENDEN GESETZEN IHRES LANDES ERFOLGEN. WENDEN SIE SICH AN DIE ZUSTÄNDIGE LOKALE STELLE, UM INFORMATIONEN ZU DEN RELEVANTEN GESETZEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING IN IHRER REGION ZU ERHALTEN.



Polymer Technology Systems, Inc.  
7736 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268 USA

**Für Hilfe zum PTS Connect™ Dock**

Rufen Sie den PTS Diagnostics Kundendienst an:  
1-877-870-5610 (Innerhalb der USA gebührenfrei)  
+1-317-870-5610 (Direktwahl) +1-317-870-5608 (Fax)

E-Mail: [inforequest@ptsdiagnostics.com](mailto:inforequest@ptsdiagnostics.com)

Website: [www.ptsdiagnostics.com](http://www.ptsdiagnostics.com)

PN 91180 DE



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany